

Chewy Tubes (咀嚼管)是什么?

Chewy Tubes™ 咀嚼管是一种新颖的口腔运动器械，能为练习咬嚼技巧提供一种有弹性的非食物可嚼表面。**Chewy Tubes™** 咀嚼管最初是被设计用于 Speech Pathology Association, LLC (语言病理协会有限责任公司) 提出的专利方法“颌康复计划”，以增进颌部运动，培养咬嚼技巧。

Chewy Tubes™ 咀嚼管能为培养咬嚼技巧提供一种无毒性的安全表面。**Chewy Tubes™** 不含乳胶和铅。它们也不含聚氯乙烯或邻苯二甲酸盐。

Chewy Tubes™ 咀嚼管以两种有趣而诱人的色彩出售。柠檬色 **Chewy Tubes™** 的咀嚼柄尺寸较小，而樱桃色 **Chewy Tubes™** 的咀嚼柄尺寸稍大。**Chewy Tubes™** 的色彩都符合美国食品与药物局的标准。

保养与清洗

Chewy Tubes™ 咀嚼管在每次使用前都必须作检查，如发现有磨损迹象就应更换。**Chewy Tubes™** 可以用淡肥皂水清洗。

欲知详情，请联系

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC
语言病理协会有限责任公司

P.O. Box 2289

SOUTH PORTLAND, MAINE 04116

电话: 207-741-2443

传真: 207-799-2289

www.chewytubes.com



Chewy Tubes

咀嚼管

新颖

口腔运动器械

用于培养咬嚼技巧

谁可以使用咀嚼管？

Chewy Tubes™ 咀嚼管是专门为儿童和成人提供了一种训练咬嚼技巧的安全、有效的工具。理疗医师可以选用 **Chewy Tubes™** 咀嚼管来治疗正在获得初步口腔运动技巧或颌骨手术、受伤或中风后正在康复的病人。寻找有本体感受的东西放入嘴内的青少年也喜欢咀嚼 **Chewy Tubes™**。小至 10 个月的婴儿都喜欢咬嚼可感知的东西，而咬嚼 **Chewy Tubes™** 就可以带来这种感觉。



Chewy Tubes™ 咀嚼管不适合于 9 个月以下的婴儿使用。

如何使用咀嚼管？

Chewy Tube™ 咀嚼管是作为有形物体放在磨牙列/磨牙龈区域，具体如下：

- ① 将 **Chewy Tube™** 咀嚼管横向放入口中。
- ② 使 **Chewy Tube™** 咀嚼管的柄与磨牙/龈的锋利表面相接触。
- ③ 咀嚼 **Chewy Tube™** 有助于改善颌部的稳固，为口腔内提供有益的感觉。

Chewy Tube™ 咀嚼管必须始终在有监督的情况下使用。在使用 **Chewy Tube™** 咀嚼管前，建议先对颌部作检查评估。病人在使用 **Chewy Tube™** 咀嚼管时必须遵照理疗医师或护理人员的建议去做。

咀嚼 **Chewy Tubes™** 既有趣又有治疗作用，无论是大嘴或是小嘴都喜欢咀嚼 **Chewy Tubes™** 所带来的嘴内有可感知物的感觉。

Chewy Tubes™
咀嚼管的表面
既光滑又有
弹性，具有培养
咬嚼技巧的作用。



有关培养咬嚼技巧的整套计划，请参阅“颌康复计划” (JAW REHABILITATION PROGRAM)