

Hvad er Chewy Tubes?

Chewy Tubes™ er en innovativ tyggeanordning, der er designet som en elastisk, ikke-spiselig, tyggeflade til at øve bide- og tyggeevner. **Chewy Tubes™** blev oprindeligt fremstillet til at blive anvendt sammen det nye **KÆBEREHABILITERINGSPROGRAM**, en patenteret metodologi fra Speech Pathology Associates, LLC til udvikling af kæbebevægelsens bide- og tyggeevner.

Chewy Tubes™ har en sikker, ugiftig flade til udvikling af bide- og tyggeevner. **Chewy Tubes™** er latex- og blyfri. Desuden indeholder de ikke PVC eller phthalater.

Chewy Tubes™ leveres i 2 sjove og flotte farver. Lemon Yellow Chewy Tubes™ har en mindre skaftstørrelse at tygge på, mens Cherry Red Chewy Tubes™ har en lidt bredere skaftstørrelse. **Chewy Tubes™** farverne er alle godkendt af FDA.

Behandling/rengøring

Chewy Tubes™ skal efterses før hver brug og udskiftes ved tegn på slitage. **Chewy Tubes™** kan vaskes med en mild sæbe og vand.

Få flere oplysninger ved at kontakte

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, INC.

P.O. Bos 2289

SOUTH PORTLAND, MAIN 04116 USA

TLF. 001-207-741-2443

FAX 001-207-799-2289

www.chewytubes.com

Chewy Tubes



INNOVATIV

Tyggeanordning

TIL UDVIKLING AF BIDE- OG TYGGEEVNER

Hvem kan benytte dem?

Chewy Tubes™ er et tilbud til børn og voksne i form af et sikkert og effektivt redskab til at øve bide- og tyggeevner. Behandlere kan vælge **Chewy Tubes™** til behandling af personer, som er ved at udvikle deres første tyggeevner eller rehabilitere kæben efter operation, traume eller slag. Børn, der søger yderligere proprioceptivt input i munden, kan også lide at bide i **Chewy Tubes™**. Børn helt ned til 10 måneder har nydt følelsen af at bide i **Chewy Tubes™**.



Chewy Tubes™ anbefales ikke til børn under 9 måneder.

Hvordan bruges de?

Chewy Tubes™ er til at tygge på med kindtænderne/ kindtændernes gummeområde på følgende måde:

- 1 Tag en **Chewy Tube™** lige ind i munden.
- 2 Berør kindtændernes bideflade/gummerne med skaftet på **Chewy Tube™**.
- 3 Vær med til at forbedre kæbekraften og sørge for en værdifuld føleevne i kæben ved at bide på en **Chewy Tube™**.

Chewy Tubes™ skal altid anvendes under overvågning. Det anbefales at vurdere kæben inden bidning i **Chewy Tubes™**. Patienter skal følge anbefalinger fra deres behandlere eller plejepersoner for brug af **Chewy Tubes™**.

Såvel små som store kæber har nydt følelsen af at bide i **Chewy Tubes™** for sjov og med terapeutiske formål.

Chewy Tubes™ er i besiddelse af en glat og elastisk flade til udvikling af bide- og tyggeevner.



Konsultér KÆBEREHABILITERINGS-PROGRAMMET for at få et fuldt program til udvikling af bide- og tyggeevner.