

Mikä on Chewy Tubes?

Chewy Tubes™ on innovatiivinen suun motoriikkaväline ja sen tarkoituksena on tarjota pureskelukyvyyn harjoittamiseksi luja pureskelupinta, joka ei ole ruokaa. **Chewy Tubes™** suunniteltiin alun perin käytettäväksi yhdessä Speech Pathology Associates, LLC:n uuden, patentoidun **LEUAN KUNTOUTUSOHJELMAN** kanssa leuan liikkeiden kehittämiseksi pureskelukykyä varten.

Chewy Tubes™ on turvallinen, myrkytön pinta pureskelukyvyyn kehittämistä varten. **Chewy Tubes™** on lateksiton ja lyijytön. Se ei myöskään sisällä PVC-muovia tai ftalaatteja.

Chewy Tubes™ -välineestä on tarjolla kaksi hauskaa ja miellyttävää väriä. Sitruunankeltaisen **Chewy Tubes™** -välineen varsi on pienempi kuin kirsikanpunaisessa **Chewy Tubes™** -välineessä. **Chewy Tube™** -värit noudattavat FDA-määräyksiä.

Hoito ja puhdistus

Chewy Tubes™ on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa ja vaihdettava uuteen, kun siinä näkyy kulumisen merkkejä. **Chewy Tubes™** voidaan pestä miedolla saippuavedellä.

Tiedustelut:

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC
P.O. Box 2289
SOUTH PORTLAND, MAINE 04116, USA

PUH: +1 207-741-2443
FAKSI: +1 207-799-2289
www.chewytubes.com



Chewy Tubes

VALMIS-
TETTU
USA:SSA



INNOVATIIVINEN

suun motoriikkaväline

PURESKELUKYVYN KEHITTÄMISEKSI

Kuka voi käyttää tätä välinettä?

Chewy Tubes™ on lapsille ja aikuisille tarkoitettu turvallinen ja tehokas väline pureskelukyvyyn kehittämistä varten. Terapeutit voivat valita **Chewy Tubes™** -välineen sellaisille henkilöille, joiden suun motoriikka on vasta kehittymässä, tai käyttää sitä kuntoutuksessa leikkauksen, onnettomuuden tai halvauksen jälkeen. Nuoret henkilöt, joiden leuka kaipaa lisää proprioseptistä palautetta, voivat myös pureskella **Chewy Tubes™** -välinettä. Niinkin nuoret kuin 10 kuukauden ikäiset potilaat nauttivat **Chewy Tubes™** -välineen pureskelun tuottamasta tuntopalautteesta.



Chewy Tubes™ -välinettä ei suositella käytettäväksi alle 9 kuukauden ikäisillä lapsilla.

Miten välinettä käytetään?

Chewy Tubes™ tuottaa tuntopalautetta poskihampaiden ja takaikenien alueelle seuraavasti:


- 1** Vie yksi **Chewy Tube™** sivuttain suuhun.
- 2** Kosketa **Chewy Tube™** -välineen varrella poskihampaiden leikkauspintaa tai ikeniä.
- 3** Paranna leuan stabiiliutta ja tuota arvokasta tuntopalautetta leukaan puremalla **Chewy Tube™** -välinettä.

Chewy Tubes™ -välinettä tulisi aina käyttää aikuisen valvonnassa. Leuka tulisi arvioida ennen **Chewy Tubes™** -välineen pureskelua. Potilaiden tulisi noudattaa terapeutin tai hoitohenkilökunnan suosituksia **Chewy Tubes™** -välinettä käytettäessä.



Niin pieni- kuin suurileukaisetkin potilaat nauttivat **Chewy Tubes™** -välineen pureskelun tuottamasta tuntopalautteesta viihdytys- ja hoitotarkoituksessa.

Chewy Tubes™
on tasainen
ja luja pinta
pureskelutaidon
kehittämistä varten.

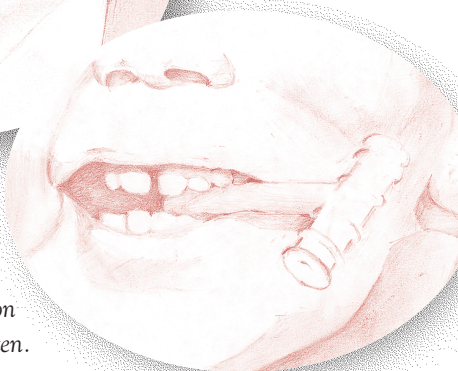

Lisätietoa pureskelukyvyyn kehittämisestä on **LEUAN KUNTOUTUSOHJELMASSA.**