

Τι είναι τα Chewy Tubes;

Τα **Chewy Tubes™** είναι μία καινοτόμος στοματοκινητική συσκευή σχεδιασμένη ώστε να παρέχει μία ελαστική, μη φαγώσιμη, μασητική επιφάνεια για τη βελτίωση της σύγκλεισης και της μασητικής ικανότητας. Τα **Chewy Tubes™** σχεδιάστηκαν αρχικά για χρήση σε συνδυασμό με το νέο **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΑΘΟΥ**, μία πατενταρισμένη μεθοδολογία που προσφέρει η Speech Pathology Associates, LLC για τη βελτίωση της κινητικότητας των σιαγόνων με σκοπό την επίτευξη καλύτερης σύγκλεισης και μασητικής ικανότητας.

Τα **Chewy Tubes™** διαθέτουν ασφαλή, μη τοξική επιφάνεια για τη βελτίωση της σύγκλεισης και της μασητικής ικανότητας. Τα **Chewy Tubes™** δεν περιέχουν λάτεξ ούτε μόλυβδο. Επιπλέον, δεν περιέχουν PVC ή φθαλικές ενώσεις.

Τα **Chewy Tubes™** διατίθενται σε 2 χαρούμενα χρώματα. Τα κίτρινα **Chewy Tubes™** έχουν μικρότερο στέλεχος ενώ τα κόκκινα **Chewy Tubes™** έχουν ελαφρώς φαρδύτερο στέλεχος. Όλα τα χρώματα των **Chewy Tubes™** συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του FDA.

Φροντίδα/Καθαρισμός

Τα **Chewy Tubes™** πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση και να αντικαθίστανται εάν φέρουν σημάδια ορατής φθοράς. Τα **Chewy Tubes™** μπορούν να πλυθούν με ήπιο σαπούνι και νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC

P.O. Box 2289

SOUTH PORTLAND, MAINE 04116

Τηλ. 207-741-2443

Φαξ 207-799-2289

www.chewytubes.com

CE

Chewy Tubes



ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
στοματοκινητική συσκευή
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Ποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει;

Τα **Chewy Tubes™** μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από παιδιά όσο και από ενήλικες ως ασφαλής και αποτελεσματική συσκευή ανάπτυξης της μασητικής ικανότητας. Οι θεράποντες μπορούν να επιλέξουν τα **Chewy Tubes™** για χρήση σε άτομα που αναπτύσσουν για πρώτη φορά στοματοκινητικές δεξιότητες, ή κατά τη φάση αποκατάστασης της γνάθου μετά από χειρουργική επέμβαση, τραύμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Παιδιά που αναζητούν επιπλέον ιδιοδεκτικά ερεθίσματα για τις σιαγόνες βρίσκουν ευχάριστο το δάγκωμα των **Chewy Tubes™**. Βρέφη από την ηλικία των 10 μηνών φαίνεται ότι απολαμβάνουν το απτικό ερέθισμα που τους προσφέρει το δάγκωμα των **Chewy Tubes™**.



Τα Chewy Tubes™ δεν συνιστώνται για χρήση από παιδιά κάτω των 9 μηνών.

Πώς χρησιμοποιούνται;

Τα **Chewy Tubes™** είναι κατάλληλα για απτικό ερέθισμα στις περιοχές των γομφίων και των ούλων τους:

- 1** Τα **Chewy Tubes™** τοποθετούνται πλάγια στο στόμα.
- 2** Το στέλεχος των **Chewy Tubes™** αγγίζει την κοπτική επιφάνεια των γομφίων και των ούλων τους.
- 3** Τα **Chewy Tubes™** βοηθούν στη βελτίωση της σταθερότητας της γνάθου και παρέχουν πολύτιμα αισθητηριακά ερεθίσματα προς τη γνάθο.

Τα **Chewy Tubes™** πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα υπό επίβλεψη. Πριν από τη χρήση των **Chewy Tubes™** συνιστάται να γίνεται εκτίμηση της γνάθου. Οι ασθενείς πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του θεράποντος ή του επαγγελματία υγείας όταν χρησιμοποιούν **Chewy Tubes™**.



*Τα **Chewy Tubes™** είναι κατάλληλα για χρήση, είτε για θεραπευτικούς σκοπούς είτε απλώς για απόλαυση, τόσο για μικρού όσο και για μεγάλου μεγέθους γνάθους.*

*Τα **Chewy Tubes™** διαθέτουν μία μαλακή και ελαστική επιφάνεια για τη βελτίωση της μασητικής ικανότητας και της σύγκλεισης.*



Για το πλήρες πρόγραμμα βελτίωσης της σύγκλεισης και της μασητικής ικανότητας, ανατρέξτε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΑΘΟΥ.