

Mi az a Chewy Tubes?

A **Chewy Tubes™** egy innovatív orális mozgató eszköz, amit egy rugalmas, nem ehető, rágható felület biztosítására alakítottak ki a harapási és rágási készség gyakorlása céljából. A **Chewy Tubes™** terméket eredetileg az új **ÁLLKAPOCS-HELYREÁLLÍTÓ PROGRAMHOZ** kapcsolódó használatra tervezték, ami a Speech Pathology Associates, LLC által ajánlott szabadalmaztatott módszer az állkapocs harapási és rágási készségének kifejlesztésére.

A **Chewy Tubes™** biztonságos, nem mérgező felületet biztosít a harapási és rágási készség kifejlesztéséhez. A Chewy Tubes™ latex- és ólommentes. Ezen felül PVC-t vagy ftalátot sem tartalmaz.

A **Chewy Tubes™** 2 vidám és kellemes színben kapható. A citromsárga Chewy Tubes™ a rágáshoz kisebb nyélméretben, míg a cseresznyepiros Chewy Tubes™ valamivel szélesebb nyélmeretben kapható. A Chewy Tube™ színek megfelelnek az FDA előírásainak.

Ápolás/Tisztítás

A **Chewy Tubes™** eszközt minden használat előtt meg kell vizsgálni és pótolni, amikor látható kopás jelek jelennek meg rajta. A Chewy Tubes™ lágy szappanos vízzel mosva tisztítható.

Meghatalmazott képviselő

Kapitex Healthcare Ltd., Tel +44(0) 1937 580211, www.Kapitex.com
1 Sandbeck Way, Wetherby, West Yorkshire LS22 7GH England

További tájékoztatást nyújt a

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC
P.O. Box 2289

SOUTH PORTLAND, MAINE 04116


TEL 207-741-2443

FAX 207-799-2289

www.chewytubes.com



Chewy Tubes

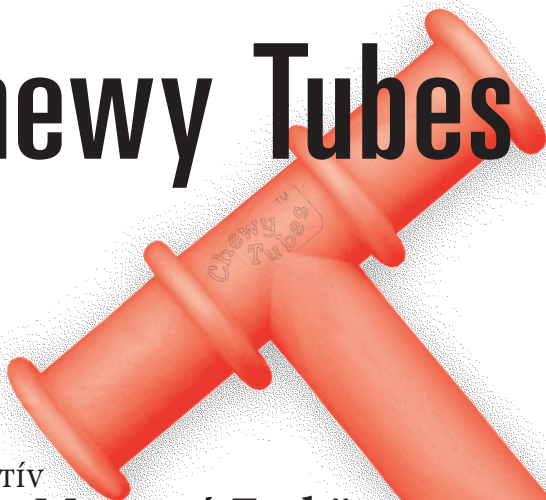

INNOVATÍV

Orális Mozgató Eszköz

**A HARAPÁSI ÉS RÁGÁSI KÉSZSÉG
KIFEJLESZTÉSÉHEZ**

Ki használhatja?

A **Chewy Tubes™** egy gyermekeknek és felnőtteknek ajánlott biztonságos és hatékony eszköz a harapási és rágási készség gyakorlására. A szakemberek a **Chewy Tubes™** használatát a kezdeti orális mozgató készség kifejlesztésére, vagy a műtét, trauma vagy sztrók utáni rehabilitáción áteső személyek kezelésében választhatják. Az állkapocsban kiegészítő proprioceptív hatásra szoruló fiatalok számára szintén könnyebbé tehető a rágás, ha a **Chewy Tubes™** eszközre harapnak. Már 10 hónapos gyermekeken is segített a **Chewy Tubes™** használata.



A Chewy Tubes™ használata 9 hónaposnál fiatalabb csecsemők számára nem ajánlott.

Hogyan kell használni?

A **Chewy Tubes™** gyengéden segít a rágófogaknál/ a rágófogak ínyének környezetében a következő módon:

- 1** Oldalirányban helyezzen be egy **Chewy Tubes™** eszközt a szájba.
- 2** Érintse a **Chewy Tubes™** nyelvét a rágófogak/íny metsző felületéhez.
- 3** Segít az állkapocs stabilitásának javításában és az állkapocs érzékelésében értékes támaszt nyújt a **Chewy Tubes™**.

A **Chewy Tubes™** felügyelet mellett használható. Mielőtt harapáshoz **Chewy Tubes™** eszközt használ, az állkapocs állapotát ajánlott felmérni. A beteg kövesse a szakember vagy ápolója javaslatát a **Chewy Tubes™** használatát illetően.

Mind a piciny, mind a nagy állkapcsoknak könnyítést jelent a Chewy Tubes™ által biztosított gyengéd segítség szórakozásként, valamint terapeutikus célokra egyaránt.

A **Chewy Tubes™** sima és rugalmas felületet biztosít a harapási és rágási készség kifejlesztéséhez.



A harapási és rágási készség kifejlesztésének komplett programjáért olvassa el az ÁLLKAPOCS-HELYREÁLLÍTÓ PROGRAMOT.