

Cosa sono i Chewy Tubes?

I **Chewy Tubes™** sono dispositivi oromotori innovativi destinati a fornire una superficie resistente e masticabile, non costituita da cibo, per esercitare la capacità di addentare e masticare. I **Chewy Tubes™** erano stati inizialmente progettati per l'uso con il nuovo **PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE DELLA MASCELLA**, una metodologia brevettata di Speech Pathology Associates, LLC per sviluppare i movimenti della mascella che consentono di addentare e masticare.

I **Chewy Tubes™** offrono una superficie sicura, non tossica per lo sviluppo della capacità di addentare e masticare. I **Chewy Tubes™** sono privi di lattice e di piombo e non contengono PVC o ftalati.

I **Chewy Tubes™** sono disponibili in 2 colori piacevoli e attraenti. I **Chewy Tubes™** giallo limone hanno uno stelo più piccolo per esercitare la masticazione mentre i **Chewy Tubes™** rosso ciliegia hanno uno stelo leggermente più grande. I colori dei **Chewy Tubes™** sono tutti conformi alla normativa FDA.

Cura e pulizia

I **Chewy Tubes™** devono essere sempre ispezionati prima dell'uso e sostituiti se presentano segni di usura. I **Chewy Tubes™** possono essere puliti lavandoli con acqua e sapone delicato.

Mandatario autorizzato

Kapitex Healthcare Ltd., Tel +44(0) 1937 580211, www.Kapitex.com
1 Sandbeck Way, Wetherby, West Yorkshire LS22 7GH England

Per ulteriori informazioni, contattare:

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC
P.O. BOX 2289
SOUTH PORTLAND, MAINE 04116

TEL 207-741-2443

FAX 207-799-2289

www.chewytubes.com



Chewy Tubes



INNOVATIVO

Dispositivo oromotorio

PER SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI
ADDENTARE E MASTICARE

Chi può usarli?

I **Chewy Tubes™** sono strumenti sicuri ed efficaci, adatti a bambini e adulti per esercitare la capacità di addentare e masticare. I terapeuti possono usare i **Chewy Tubes™** per il trattamento di chi sta sviluppando i muscoli del distretto orale o per la riabilitazione della mascella dopo interventi chirurgici, traumi o ictus. I **Chewy Tubes™** sono adatti anche ai più piccoli per svilupparne la capacità propriocettiva. E bimbi di soli 10 mesi hanno trovato piacevole la sensazione tattile offerta dal masticare i **Chewy Tubes™**.



I **Chewy Tubes™** non sono consigliati per i bambini di età inferiore ai 9 mesi.

Come vengono usati?

I **Chewy Tubes™** stimolano sensazioni tattili sul locus della dentizione molare/della regione gengivale molare:

- ❶ Inserire un **Chewy Tubes™** lateralmente nella bocca.
- ❷ Appoggiare lo stelo del **Chewy Tubes™** sulla superficie dei molari/gengiva.
- ❸ La masticazione sul **Chewy Tubes™** aiuta a ottimizzare la stabilità della mascella e stimolarne le sensazioni sensoriali.

I **Chewy Tubes™** devono essere usati sempre sotto supervisione. Si consiglia la valutazione della mascella prima di iniziare a masticare i **Chewy Tubes™**. I pazienti devono seguire i consigli del loro terapeuta o caregiver per usare i **Chewy Tubes™**.



*Le sensazioni tattili offerte dal masticare i **Chewy Tubes™** sia a scopo di divertimento che di terapia sono risultate piacevoli per mascelle piccole e grandi.*

*I **Chewy Tubes™** offrono una superficie sicura, non tossica per lo sviluppo della capacità di addentare e masticare.*



Per un programma completo su come sviluppare la capacità di addentare e masticare, fare riferimento al **PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE DELLA MASCELLA.**