

Что такое жевательные трубки?

Жевательные трубки *Chewy Tubes*™ – это инновационные приспособления для развития оральной моторики рта, которые обеспечивают эластичную непищевую жевательную поверхность для тренировки навыков кусания и жевания. Первоначально трубки *Chewy Tubes*™ разрабатывались для использования в рамках новой программы челюстной реабилитации **JAW REHABILITATION PROGRAM** (запатентованной методологии развития челюстной моторики компании Speech Pathology Associates, LLC для тренировки навыков кусания и жевания).

Трубки *Chewy Tubes*™ обеспечивают безопасную нетоксичную поверхность для развития навыков кусания и жевания. Трубки *Chewy Tubes*™ не содержат ни латекса, ни свинца. Они также не содержат ни ПВХ, ни фталатов.

Трубки *Chewy Tubes*™ выпускаются в двух приятных, привлекательных расцветках. У лимонно-желтых трубок *Chewy Tubes*™ размер самой жевательной трубки меньше, а у вишнево-красных трубок *Chewy Tubes*™ - немного больше. Краски, используемые для жевательных трубок *Chewy Tubes*™, соответствуют всем требованиям FDA.

Чистка и обслуживание

Перед каждым использованием жевательные трубки *Chewy Tubes*™ необходимо проверять, и при обнаружении признаков износа их необходимо заменять. Промывать трубки *Chewy Tubes*™ можно с помощью воды и мягкого мыльного раствора.

Авторизованный представитель

Kapitex Healthcare Ltd., Tel +44(0) 1937 580211, www.Kapitex.com
1 Sandbeck Way, Wetherby, West Yorkshire LS22 7GH England

*Для получения более подробной информации,
пожалуйста, обращайтесь в*

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC

P.O. Box 2289

SOUTH PORTLAND, MAINE 04116

Тел.: 207-741-2443

Факс: 207-799-2289

www.chewytubes.com



Chewy Tubes

Инновационное
приспособление для
тренировки оральной моторики
с целью развития навыков кусания и жевания

Для кого они предназначены?

Жевательные трубки *Chewy Tubes*™ – это безопасный и эффективный инструмент для тренировки навыков кусания и жевания у детей и взрослых. Врачи могут использовать жевательные трубки *Chewy Tubes*™ для лечения детей, у которых только формируются первичные навыки оральной моторики, а также для восстановления движения челюстей после операций, травм и инсультов. Детям, нуждающимся в дополнительном проприоцептивном раздражении ротовой полости, возможно, также понравится кусать трубки *Chewy Tubes*™. Детям в возрасте 10 месяцев нравятся тактильные ощущения, возникающие при кусании *Chewy Tubes*™.



Не рекомендуется использовать трубки *Chewy Tubes*™ для лечения детей до 9 месяцев.

Как пользоваться трубками *Chewy Tubes*™?

Трубки *Chewy Tubes*™ обеспечивают нужные тактильные ощущения в зонах молярных зубов и в прилегающих к ним деснах.

- 1 Вставьте трубку *Chewy Tube*™ в рот пациенту латерально.
- 2 Касайтесь рабочим элементом *Chewy Tube*™ режущих поверхностей молярных зубов и десен.
- 3 Это помогает сделать челюсти более прочными и обеспечивает полезные сенсорные ощущения в полости рта при кусании *Chewy Tube*™.

Трубки *Chewy Tubes*™ следует использовать только под контролем. Перед тем как разрешить пациенту кусать *Chewy Tubes*™, рекомендуется оценить состояние его жевательного аппарата. При использовании *Chewy Tubes*™ пациенты должны следовать рекомендациям своего врача или воспитателя/ухаживающего лица.

*Тактильные ощущения, возникающие при кусании *Chewy Tubes*™ как в лечебных целях, так и просто для удовольствия, не зависят от размера челюстей.*

Трубки *Chewy Tubes*™ обеспечивают гладкую и упругую поверхность для развития навыков кусания и жевания.



Относительно комплексной программы развития навыков кусания и жевания – см. программу реабилитации **JAW REHABILITATION PROGRAM**.